



المحترمين  
المحترمين

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية  
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة  
تحية طبية وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية

## **T2100 Treadmill Uncontrolled Walking Belt Motion**

### **GE Healthcare** والشركة المصنعة

تشكر تعاونكم وتواصلكم المثمر معنا في سبيل الصالح العام، ونود إعلامكم بأن الشركة المصنعة قد أصدرت تحذيرا بخصوص استخدام الوسيلة الطبية المذكورة أعلاه، وذلك لأن حزام الحركة قد يبطئ أو يتسارع فجأة في اتجاه الأمام أو الخلف أثناء ممارسة المشي، وعند ضغط زر التوقف لا يتوقف على الفور، مما قد يتسبب في سقوط وإصابة المريض. وبناءا عليه توصي شركة **GE** جميع مستخدمين الوسيلة الطبية المذكورة أعلاه بأخذ الاحتياطات التالية:

1. استمرار الضغط على زر التوقف في حالات الطوارئ حتى تتوقف الجهاز كاملا.
  2. التوقف عن استخدام الوسيلة الطبية المذكورة أعلاه عند ملاحظة أي حركة غير منتظمة للجهاز والاتصال بمندوب الشركة لإصلاحها أو استبدالها.
- علما بأن هذا المنتج غير مسجل في إدارة الدواء بوزارة الصحة وإنما حرصا منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجد لديكم.

وفي حال حدوث أي أعراض جانبية يرجى ملئ الإستمارة الخاصة بالآثار الجانبية للدواء ADR والمتوفرة على الموقع

<http://www.cpd-pharma.ae> ، أو الإتصال على العناوين التالية:

هاتف: 6117391 - 02 أو 2301477 - 04 أو فاكس 6313742 - 02 أو البريد الإلكتروني: [pv@moh.gov.ae](mailto:pv@moh.gov.ae)

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير.

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص

صدر بيديوان عام الوزارة/ دبي بتاريخ: 18/05/2015  
نسخة:



- .. المحترم ،،
  - .. المحترمة ،،
- معالي / وزير الصحة
  - سعادة / وكيل وزارة الصحة
  - سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
  - سعادة / المدير العام لهيئة الصحة - دبي
  - سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
  - سعادة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
  - سعادة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
  - سعادة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
  - سعادة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
  - سعادة / مديرة إدارة الدواء

مدير إدارة الدواء