



التاريخ: 2016/3/17
الرقم: 2016/466/15

السادة الأفاضل/ مدراء المناطق الطبية
السادة الأفاضل / مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة
المحترمين
المحترمين
تحية طيبة وبعد،

م/ تقارير السلامة للوسائل الطبية

3.0T GEM Flex Coil 16-L Array 5430008-2

3.0T GEM Flex Coil 16-M Array 5430008-3

3.0T GEM Flex Coil 16-S Array 5430008-4

3.0T GEM Flex Interface 5430008-5

المصنعة من شركة (GE Healthcare.) الأمريكية

نشكر تعاونكم وتواصلكم المثمر معنا في سبيل مصلحة المرضى، ونود إعلامكم بأن شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية قد أصدرت تحذيراً حول استخدام الأجهزة المذكورة أعلاه، وذلك بسبب احتمالية تسخين الكابلات عند استخدام الجهاز، مما قد يؤدي إلى حدوث حروق طفيفة عند ملامسة جلد المريض مباشرة. وبناءً عليه توصي شركة GE جميع ممارسي الرعاية الصحية المستخدمين للأجهزة المذكورة بأخذ الاحتياطات التالية:

1. يجب وضع غطاء الرغوة على سطح المنتج.
2. يمكن استخدام وسادة لعدم لمس الكابل جلد المريض
3. طول الكابل يجب أن يكون أدنى حد ممكن.

وسوف تقوم الشركة باستبدال الأجهزة المتأثرة مجاناً.

علماً بأن المنتجات المذكورة غير مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة ولكن حرصاً منا على سلامة المرضى ارتأت الإدارة إبلاغكم بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة إن وجدت لديكم.

وفي حالة وجود أي ملاحظات تخص سلامة المنتج يرجى التواصل على الأرقام التالية:

هاتف: 04- 2301448 أو فاكس 04- 2301947 أو البريد الإلكتروني: pv@moh.gov.ae

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

د. أمين حسين الأميري

وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص

صدر بيدي ان عام الوزارة/الوظيفي بتاريخ: 2016/3/
نسخة:



- معالي / وزير الصحة ووقاية المجتمع
- معالي / رئيس مجلس ادارة هيئة الصحة - دبي
- مساعدة / وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع
- مساعدة / المدير العام لهيئة الصحة - أبو ظبي
- مساعدة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات
- مساعدة / وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية
- مساعدة / مدير المكتب الطبي/وزارة شؤون الرئاسة
- مساعدة / المدير التنفيذي لمدينة دبي الطبية
- مساعدة / مدير إدارة سلاح الخدمات الطبية/القوات المسلحة
- مساعدة / مديرة إدارة الدواء

مدير ادارة الدواء